

Upustvo za upotrebu- predlog

Ovlašćeni predstavnik: Dental Express d.o.o., Uroša martinovića 21/L2, Novi Beograd, 011/3111048, office@dentalexpress.rs

Proizvođač: Myofunctional Research CO., 44 Signato Drive, Helensvale QLD 4212, Australia

Broj upisa u registar:515-02-01736-2023-7

MyOSA for teethgrinders – uložak za korekciju zagrižaja

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovo medicinsko sredstvo je isključivo za profesionalnu upotrebu i ne može se koristiti bez nadzora doktora stomatologije ili specijaliste ortopedije vilica. Neophodno je da pažljivo koristite medicinsko sredstvo.

Aparat je namenjen za jednog pacijenta. Upotreba aparata na drugom pacijentu ne dovodi do željenih rezultata.

Čuvati na sobnoj temperaturi.

Pakovanje: 1 aparat pakovan u kutiji.

U ovom uputstvu pročit ćete:

1. Razumevanje problema
2. Opis aparata
3. Kako se upotrebljava?
4. Način upotrebe
5. Moguće neželjene reakcije
6. Čišćenje i čuvanje aparata
7. Ostale informacije

Razumevanje problema

Bruksizam je simptom često povezan sa lošom navikom disanja na usta, provociran stresom. Bruksizam može dovesti do niza problema sa zubima. Dok su svi aparati iz myOSA programa dizajnirani i za ovaj problem, myOSA TG je specifično dizajniran samo za tu vrstu problema.

MyOSA TG dobro prijanja na gornju vilicu i tokom sna omogućava zaštitu i za zube i za zglobove.

Kako se upotrebljava

MyOSA TG je najbolje koristiti u situacijama kada postoji bruksizam, ali još uvek nije praćen problemom sa TM zglobovom. Materijal od koga je napravljen myOSA TG je fleksibilan i dobro prijanja na zube. Nakon lake adaptacije, preporuka je da se TG nosi u toku noći, kao i u toku dana, ukoliko je i tada problem prisutan.

Opis aparata

MyOSA TG je adaptibilan aparat za gornju vilicu dizajniran da odmah spreči moguće posledice bruksizma. Adaptacija je jednostavna i traje 2 min. Čvršća verzija ovog aparata je takođe dostupna za jači stepen bruksizma praćen problemom sa TM zglobovom.

Način upotrebe

MyOSA TG naleže na zube i nosi se u toku noći. Na delu gde se zubi dodiruju poseduje odgovarajuće jastuče koje sprečava negativne posledice bruksizma. MyOSA TG se lako modeluje u nekoliko koraka:

- a. Sipati prokuvanu vodu u staklenu posudu. Odmah

staviti aparat u staklenu posudu sa vodom u trajanju od 30 sec.

- b. Nakon 30 sec polako izvući aparat pomoću metalne kašike i ohladiti je 1 sec samo (samo da temperatura bude prijatna)
- c. Centrirati aparat u ustima, voditi računa na medijalnu liniju aparata i zubnog niza i adaptirati pomoću prstiju oko zuba, a najviše oko zubnih površina.
- d. Polako zatvoriti usta i praviti poteze sisanja nekih 20 sec
- e. Nakon adaptacije staviti aparat pod hladnom vodom 2 min kako bi zadržala odgovarajući oblik

Moguće neželjene reakcije

Zubi mogu postati u početku tretmana osetljiviji, to je potpuno normalno, ali ako osetljivost i bol perzistira obratite se Vašem stomatologu, ortodontu.


Čišćenje: Čistiti tekućom toplom vodom svaki put kada aparat izvadite iz usta. Koristiti Myoclean tablete da temeljno očistite aparat dva puta nedeljno. Pitajte Vašeg doktora za Myoclean, preporučeno sredstvo za čišćenje svih MRC aparata. Aparat čuvati na sobnoj temperaturi.

Ostale informacije

OPREZ: KORISTITI APARAT SAMO POD NADZOROM LICENCIIRANOG ORTODONTA ILI DOKTORA



Myofunctional Research Co., Australia, 44 Signato Drive, Helensvale QLD 4212 Australia, Tel:
+61 7 5573 5999

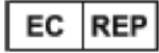

European Representative: Myofunctional Research Europe B.V.
Gompensstraat 21C 5145 RM Waalwijk, Netherlands
P.O. Box 718, 5140 AS Waalwijk, Netherlands
Tel: +31 416 651 696

