

Upustvo za upotrebu- predlog

Ovlašćeni predstavnik: Dental Express d.o.o., Uroša martinovića 21/L2, Novi Beograd, 011/3111048, office@dentalexpress.rs

Proizvođač: Myofunctional Research CO., 44 Signato Drive, Helensvale QLD 4212, Australia

Broj upisa u registar:515-02-01736-2023-7

Myobrace for braces B2 – uložak za korekciju zagrižaja

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovo medicinsko sredstvo je isključivo za profesionalnu upotrebu i ne može se koristiti bez nadzora doktora stomatologije ili specijaliste ortopedije vilica. Neophodno je da pažljivo koristite medicinsko sredstvo.

Aparat je namenjen za jednog pacijenta. Upotreba aparata na drugom pacijentu ne dovodi do željenih rezultata.

Čuvati na sobnoj temperaturi.

Pakovanje: 1 aparat pakovan u kutiji.

U ovom uputstvu pročit ćete:

1. Šta prouzrokuje ortodonske probleme?
2. Šta je uložak za korekciju zagrižaja i čemu je namenjen?
3. Kako deluje
4. Kako se upotrebljava?
5. Procedura postavljanja aparata u ustima
6. Moguće neželjene reakcije
7. Koji je cilj tretmana

8. Čišćenje i čuvanje miofunkcionalnog aparata
9. Ostale informacije

Šta prouzrokuje ortodonske probleme?

Većina naše dece ima problem sa teskobama u zubnom nizu i nepravilne položaje vilica. Terapiju se u većini slučajeva sprovodi sa fiksnim ortodonskim aparatima, koje su uspešne u ispravljanju zuba, ali loše navike kao što su: disanje na usta, guranje jezika unapred, infatilno gutanje i sisanje palca su pravi uzroci nepravilnosti i dovode do težeg postizanja rezultata i pojave recidiva nakon skidanja fiksnog aparata. Ove loše navike se mogu uspešno lečiti zajedno sa fiksnim aparatom ukoliko se koristi miofunkcionalni aparat.

Šta je uložak za korekciju zagrižaja B2 čemu je namenjen?

Myobrace B2 stalna denticija sa fiksnim ortodonskim aparatom je dizajniran da se koristi preko fiksnog ortodonskog aparata sa ciljem razvitka vilica i postizanja boljih rezultata.

Myobrace B2 se koristi kao druga faza i njen cilj je razvitak vilica. Myobrace za stalnu denticiju sa fiksnim aparatom se sastoji od ukupno 3 faze B1, B2 i B3

Kako deluje?

B2 poseduje nekoliko bitnih elemenata koji omogućavaju da se dete prijavno razvija

1. Dynamicore – plastična košuljica koja pomaže u razvitku vilica
2. Braces chanel- prostor za bravice i lukove

3. Tongue Tag and guard– postavlja mišić jezika u adekvatni položaj
4. Lip bumper- utiče na mišić usana

Kako se upotrebljava

Myobrace aparat nositi tokom cele noći i još 1h do 2h u toku dana.

Procedura postavljanja aparata u ustima pacijenta:

- Step 1. Držite uložak tako da je graničnik za jezik postavljen nagore
- Step 2. Postavite uložak u usta
- Step 3. Držite položaj jezika tako da se jezik dodiruje svojom gornjom stranom i vrhom graničnik za jezik.
- Step 4. Zatvorite usne i dišite kroz nos
- Oprez. Ne grizite Myobrace!!!
- Oprez. Može se desiti da Myobrace aparat ispadne tokom noći u početku terapije, ukoliko se to dogodi povećajte nošenje aparata u toku dana.

Moguće neželjene reakcije

Zubi mogu postati u početku tretmana osetljiviji, to je potpuno normalno, ali ako osetljivost i bol perzistira obratite se Vašem stomatologu, ortodontu.

Cilj tretmana:

- Usne su sastavljene, sem tokom govora i jela

- Disanje je na nos što omogućava pravilni razvitak gornje i donje vilice i pravilan preklap zuba
- Nema aktivnosti usana prilikom gutanja, što omogućava prednjim zubima da se normalno razvijaju
- Poboljšan raspored zuba u vilici

- Poboljšan razvitak lica

Dužina trajanja tretmana je individualna. Promena aparata je 6 meseci nakon aktivne upotrebe.

Čišćenje: Čistiti tekućom toplom vodom svaki put kada aparat izvadite iz usta. Koristiti Myoclean tablete da temeljno očistite aparat dva puta nedeljno. Pitajte Vašeg


doktora za Myoclean, preporučeno sredstvo za čišćenje svih MRC aparata. Aparat čuvati na sobnoj temperaturi.

Ostale informacije

OPREZ: KORISTITI APARAT SAMO POD NADZOROM LICENCIROANOG ORTODONTA ILI DOKTORA



Myofunctional Research Co., Australia, 44 Signato Drive, Helensvale QLD 4212 Australia, Tel: +61 7 5573 5999

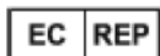

European Representative: Myofunctional Research Europe B.V.
Gompenstraat 21C 5145 RM Waalwijk, Netherlands
P.O. Box 718, 5140 AS Waalwijk, Netherlands
Tel: +31 416 651 696

