

Upustvo za upotrebu- predlog

Ovlašćeni predstavnik: Dental Express d.o.o., Uroša martinovića 21/L2, Novi Beograd, 011/3111048, office@dentalexpress.rs

Proizvođač: Myofunctional Research CO., 44 Signato Drive, Helensvale QLD 4212, Australia

Broj upisa u registar:515-02-01736-2023-7

Myotalea TLJ – uložak za terapiju mišića jezika i usana i zgloba vilice

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovo medicinsko sredstvo je isključivo za profesionalnu upotrebu i ne može se koristiti bez nadzora doktora stomatologije ili specijaliste ortopedije vilica. Neophodno je da pažljivo koristite medicinsko sredstvo.

Aparat je namenjen za jednog pacijenta. Upotreba aparata na drugom pacijentu ne dovodi do željenih rezultata.

Čuvati na sobnoj temperaturi.

Pakovanje: 1 aparat pakovan u kutiji.

U ovom uputstvu pročit ćete:

1. Razumeti problem
2. Opis aparata
3. Kako se upotrebljava?
4. Indikacije
5. Način upotrebe
6. Moguće neželjene reakcije
7. Čišćenje i čuvanje aparata
8. Ostale informacije

Razumeti problem

Pacijenti sa ortodontskim problemima, sa problemima u disanju, poremećenoj funkciji mišića jezika i usana i mišića vilice moraju prepoznati ovaj problem koji može dovesti to problema sa disanjem i poremećajem sna.

TLJ je aktivan aparat koji služi u pronalasku ravnoteže mišića jezika, usana i vilica. Pomoćne vežbe se takođe preporučuju, pogotovu kod pacijenata sa već razvijenim poremećajem sna.

TLJ ima nekoliko beneficija:

- Uklanja lošu naviku disanja na usta
- Loš polžaj usana
- Lošu poziciju jezika
- Nepravilno gutanje
- Utiče na mišiće vilice

Opis aparata

Lip Press Tube- tuba koja omogućava vežbanje mišića usana i podstiče disanje na nos

Tongue Press Tube- omogućava vežbanje jezika i njegovu pravilnu poziciju

Air Springs – omogućava vežbanje mišića vilica i pozitivno utiče na Tmzglob

Anterior Lip Bumpers – smanjuje preveliku aktivnost mišića brade i usana i utiče na ispravljanje nepravilnog gutanja

Tongue Elevators- omogućava da jezik bude u pravilnom položaju.

Kako se upotrebljava

Malookluzije, problemi sa disanjem i snom, kao i problemi sa zglobom su posledice slabe snage mišića orofacijalne regije. Pacijenti koji pate od poremećaja sna i problema

sa TM zglobom su najčešće pacijenti koji dišu na usta. Disanje na usta i nerazvijeni mišići vilice, kao i donja vilica utiču da dže doporemećaja u disanju u snu, pa samim tim i poremećaja sna.

Indikacije

Myotalea TLJ je aparat namenjen pacijentima sa simptomima poremećaja disanja i sna, kao i sa problemima sa TM zglobom. Kod pacijenta koji imaju slab tonus mišića jezika, usana i vilica takođe se takođe koristi ovaj aparat.

Način upotrebe

Preporuka je da se TLJ koristi 3 min dva puta dnevno.

Jezik

- Postaviti aparat tako je jezičak postavljen na gore
- Postaviti aparat u usta tako da jezičak pritisnete pomoću jezika na palatum
- Zadržite tako i lagano dišite kroz nos
- Zabacite glavu u nazad

Usne

- Postavite aparat tako da se Lip Press Tube nalazi između usana
- Spojiti usne i pritisnite tubu
- Zadržite tako i lagano dišite na nos
- Zabacite glavu u nazad

TM Zglob

- Postavite aparat tako da se zubi nalaze u aparatu
- Lagano zagrizite tako da pritisnete Air Springs
- Zadržite tako i lagano dišite kroz nos

- Zabcite glavu u nazad

Pored ovih osnovnih načina moguće je ih je kombinovati po sledećem redosledu

1. Jezik i usne – 3 ponavljanja
2. Jezik – 3 ponavljanja
3. Usne – 3 ponavljanja
4. TM Zglog – 3 ponavljanja
5. Jezik i usne – 3 ponavljanja

Moguće neželjene reakcije

Zubi mogu postati u početku tretmana osetljiviji, to je potpuno normalno, ali ako osetljivost i bol perzistira obratite se Vašem stomatologu, ortodontu.

Čišćenje: Čistiti tekućom toplom vodom svaki put kada aparat izvadite iz usta. Koristiti Myoclean tablete da temeljno očistite aparat dva puta nedeljno. Pitajte Vašeg


doktora za Myoclean, preporučeno sredstvo za čišćenje svih MRC aparata. Aparat čuvati na sobnoj temperaturi.

Ostale informacije

OPREZ: KORISTITI APARAT SAMO POD NADZOROM LICENCIROANOG ORTODONTA ILI DOKTORA



Myofunctional Research Co., Australia, 44 Signato Drive, Helensvale QLD 4212 Australia, Tel: +61 7 5573 5999

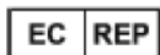

European Representative: Myofunctional Research Europe B.V.
Gompenstraat 21C 5145 RM Waalwijk, Netherlands
P.O. Box 718, 5140 AS Waalwijk, Netherlands
Tel: +31 416 651 696

