

Upustvo za upotrebu- predlog

Ovlašćeni predstavnik: Dental Express d.o.o., Uroša martinovića 21/L2, Novi Beograd, 011/3111048, office@dentalexpress.rs

Proizvođač: Myofunctional Research CO., 44 Signato Drive, Helensvale QLD 4212, Australia

Broj upisa u registar:515-02-01736-2023-7

Infant trainer T4I – uložak za korekciju zagrižaja

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovo medicinsko sredstvo je isključivo za profesionalnu upotrebu i ne može se koristiti bez nadzora doktora stomatologije ili specijaliste ortopedije vilica. Neophodno je da pažljivo koristite medicinsko sredstvo.

Aparat je namenjen za jednog pacijenta. Upotreba aparata na drugom pacijentu ne dovodi do željenih rezultata.

Čuvati na sobnoj temperaturi.

Pakovanje: 1 aparat pakovan u kutiji.

U ovom uputstvu pročit ćete:

1. Informacije za pacijenta
2. Šta je miofunkcionalni aparat i čemu je namenjen?
3. Kako deluje
4. Kako se upotrebljava?
5. Procedura postavljanja aparata u ustima
6. Moguće neželjene reakcije
7. Koji je cilj tretmana

8. Čišćenje i čuvanje miofunkcionalnog aparata
9. Ostale informacije

Informacije za pacijenta

Pravilan rast i razvoj dece je takođe veoma bitno, kao i zdravlje i edukacija. Deca se najbrže razvijaju u periodu od 2-5 godina, pri čemu dolazi do 70% ukupnog razvoja lica i vilica. Međutim, kod većine dece dolazi do nepravilnog razvitka lica i vilica usled neadekvatne ishrane tj. Stimulacije. Takođe se kod takve dece može razviti loše navike: sisanje palca, nepravilno gutanje i disanje na usta. Sve to dovodi do nedovoljnog razvitka lica i vilica i kao posledicu loše postavljene zube.

Šta je uložak za korekciju zagrižaja T4I i čemu je namenjen?

T4I je aktivan sistem specijalno dizajniran za korekciju loših oralnih navika i istovremeno ispravlja probleme u razvitku gornje i donje vilice, kao i pravilnom položaju zuba. Veoma bitno je da T4I tera vaše dete da diše na nos, drži jezik u pravilnom položaju i dovodi do pravilnog gutanja. Upotreba ovog aparata može dovesti do toga da neće biti potrebe za ostalim ortodontskim tretmanima i ekstrakcijama kako vaše dete bude raslo.

Kako deluje?

T4I poseduje nekoliko bitnih elemenata koji omogućavaju da se dete prijavno razvija

1. Air Spring- omogućava nežnu i aktivnu stimulaciju mišića
2. Tongue Tag – postavlja mišić jezika u adekvatni položaj

3. Tongue Gard- sprečava sisanje palca i guranje jezika

Istraživanja pokazuju da osobe sa lošom navikom disanja na usta imaju manje atraktivno lice od osoba koja dišu na nos. T4I omogućava detetu da prestane sa disanjem na usta i počne pravilno da diše na nos.

Traka- mlađa deca će koristiti taj aparat kratko i izbaciti ga iz usta. U sastavu T4I se nalazi i gumena traka koju možete pričvrstiti za neki deo odeće, jer će oni vrlo brzo želeći da ponovo vrate aparat u usta, zbog potrebe deteta da nešto žvaće.

Kako se upotrebljava

Pokažite detetu aparat i dozvolite mu da ga ispita. Ohrabrite ga da ga sam stavi u usta. Deca od 2-5 godina će prirodno gristi aparat. Ohrabrite ga da drži usta zatvorena. Koristiti 2 puta dnevno po 10-20 min.

Procedura postavljanja aparata u ustima pacijenta:

- Step 1. Držite uložak tako da je graničnik za jezik postavljen nagore
- Step 2. Postavite uložak u usta
- Step 3. Držite položaj jezika tako da se jezik dodiruje svojom gornjom stranom i vrhom graničnik za jezik.
- Step 4. Zatvorite usne i dišite kroz nos

Moguće neželjene reakcije

Zubi mogu postati u početku tretmana osetljiviji, to je potpuno

normalno, ali ako osetljivost i bol perzistira obratite se Vašem stomatologu, ortodontu.

Cilj tretmana:

- Usne su sastavljene, sem tokom govora i jela
- Disanje je na nos što omogućava pravilni razvitak gornje i donje vilice i pravilan preklop zuba

- Nema aktivnosti usana prilikom gutanja, što omogućava prednjim zubima da se normalno razvijaju
- Poboljšan raspored zuba u vilici
- Poboljšan razvitak lica

Dužina trajanja tretmana je individualna. Promena aparata je 6 meseci nakon aktivne upotrebe.


Čišćenje: Čistiti tekućom toplom vodom svaki put kada aparat izvadite iz usta. Koristiti Myoclean tablete da temeljno očistite aparat dva puta nedeljno. Pitajte Vašeg doktora za Myoclean, preporučeno sredstvo za čišćenje svih MRC aparata. Aparat čuvati na sobnoj temperaturi.

Ostale informacije

OPREZ: KORISTITI APARAT SAMO POD NADZOROM LICENCIRANOG ORTODONTA ILI DOKTORA



Myofunctional Research Co., Australia, 44 Signato Drive, Helensvale QLD 4212 Australia, Tel: +61 7 5573 5999

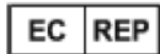

European Representative: Myofunctional Research Europe B.V.
Gompenstraat 21C 5145 RM Waalwijk, Netherlands
P.O. Box 718, 5140 AS Waalwijk, Netherlands
Tel: +31 416 651 696

