

Upustvo za upotrebu- predlog

Ovlašćeni predstavnik: Dental Express d.o.o., Uroša martinovića 21/L2, Novi Beograd, 011/3111048, office@dentalexpress.rs

Proizvođač: Myofunctional Research CO., 44 Signato Drive, Helensvale QLD 4212, Australia

Broj upisa u registar:515-02-01736-2023-7

MyOSA TMJBDS S2 udloga, oralna, protiv hrkanja i tretman apnee

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovo medicinsko sredstvo je isključivo za profesionalnu upotrebu i ne može se koristiti bez nadzora doktora stomatologije ili specijaliste ortopedije vilica. Neophodno je da pažljivo koristite medicinsko sredstvo.

Aparat je namenjen za jednog pacijenta. Upotreba aparata na drugom pacijentu ne dovodi do željenih rezultata.

Čuvati na sobnoj temperaturi.

Pakovanje: 1 aparat pakovan u kutiji.

U ovom uputstvu pročit ćete:

1. Razumeti problem
2. Opis aparata
3. Kako se upotrebljava?
4. Indikacije
5. Način upotrebe
6. Moguće neželjene reakcije
7. Čišćenje i čuvanje aparata
8. Ostale informacije

Razumeti problem

Problemi sa snom i zglobovima mogu dovesti do niza veoma ozbiljnih poremećaja koji se javlja kod velikog broja ljudi. Pacijenti najčešće budu pogrešno lečeni zbog pogrešne dijagnoze jer simptomi koji nastaju nisu specifični za ovaj problem. Simptomi su glavobolja, bol u vratu, hrkanje u toku noći.

Disanje na usta nije normalno stanje i jedan je od glavnih uzročnika poremećaja sna. Ukoliko dete diše na usta, vilice se neće razviti na odgovarajući način. Najčešće odrasli pacijenti koji imaju poremećaj sna imaju nerazvijenu donju vilicu, što sprečava da se jezik nađe u svojoj poziciji i samim tim opstruše disajni put.

Opis aparata

- Visoki graničnici omogućavaju dobru retenciju
- 4 velike rupe regulišu disanje kod pacijenata koji disaju na usta
- Tongue tag usmerava položaj jezika i drži ga na pravoj poziciji
- Mekan i fleksibilan materijal je dizajniran da otvori disanje puteve
- Air Spring Core otvara disajne puteve i relaksira pritisak u TM zglobovima

Kako se upotrebljava

MyOSA TMJBDS S2 sje druga faza terapije. Prva faza je specifično dizajnirana za pacijente koji dišu na usta. Druga faza je dizajnirana tako da sledi nakon poboljšanja nakon I faze. Na osnovu svog dizajna on otvara disajni put i sadrži 4 velikih rupa koji omogućavaju disanje. Za bolju adaptaciju može se koristiti i adaptivna verzija S2 mouldable.

Indikacije

Pre upotrebe ovog aparata nekada je potrebno poslati pacijenta kod lekara radi detaljne analize. Ovaj aparat se koristi u toku dana u trajanju u kome je on komforan za nošenje. Kada je prošao period privikavanja onda je potrebno aparat nositi 1h u toku dana i u toku noći.

Način upotrebe

1. Postaviti aparat tako je jezičak postavljen na gore
2. Postaviti aparat u usta
3. Jezik neka dodiruje jezičak aparata
4. Dozvolite da aparat pogura vilicu unapred
5. Potrudite se da držite usta zatvorena i trudite se da dišete na nos

OPREZ: NEMOJTE GRISTITI APARAT

Moguće neželjene reakcije

Zubi mogu postati u početku tretmana osetljiviji, to je potpuno normalno, ali ako osetljivost i bol perzistira obratite se Vašem stomatologu, ortodontu.

OPREZ: Ovaj aparat može dovesti do blagog pomeranja zuba.


Čišćenje: Čistiti tekućom toplom vodom svaki put kada aparat izvadite iz usta. Koristiti Myoclean tablete da temeljno očistite aparat dva puta nedeljno. Pijte Vašeg doktora za Myoclean, preporučeno sredstvo za čišćenje svih MRC aparata. Aparat čuvati na sobnoj temperaturi.

Ostale informacije

OPREZ: KORISTITI APARAT SAMO POD NADZOROM LICENCIROANOG ORTODONTA ILI DOKTORA



Myofunctional Research Co., Australia, 44 Signato Drive, Helensvale QLD 4212 Australia, Tel:
+61 7 5573 5999

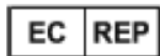

European Representative: Myofunctional Research Europe B.V.
Gompensstraat 21C 5145 RM Waalwijk, Netherlands
P.O. Box 718, 5140 AS Waalwijk, Netherlands
Tel: +31 416 651 696

