

DOC-843

Uputstvo za upotrebu

Naziv proizvoda: Expansion screw 139-1311/179-1317 – zavrtanj ortodontski

Proizvođač: Bernhard Forster GmbH, Westliche Karl-Friedrich-Strasse 151 – 75172 Pforzheim, Germany

Phone - +49 7231 459-0. Fax +49 7231 459-102

info@forestadent.com, www.forestadent.com

Ovlašćeni predstavnik: Dental Express d.o.o., Uroša Martinovića 21/L2, Novi Beograd, tel: +38111/3111048, email: office@dentalexpress.rs

Broj upisa u registar: 000457930 2025 59010 009 000 515 059 04 003

Pakovanje: 10 komada

139-1311/179-1317



Svrha

Ortodontski kompaktni vučni šrafovi služe za pomeranje zuba ili ispravljanje zagrižaja tokom ortodontskog tretmana uz pomoć mobilnih ortodontskih aparata.

Jednokratna upotreba

FORESTADENT kompaktni vučni šrafovi su namenjeni za jednokratnu upotrebu. Ne smeju se ponovo koristiti ili ponovo koristiti za druge postavke. Uklanjanje šrafova, reprocesiranje i ponovno korišćenje može promeniti svojstva proizvoda, kao što su dimenziona stabilnost i zadržavanje oblika, do nepredvidivog obima i takođe može dovesti do zamora materijala.

Karakteristike performansi i specifikacije

Osobine	139-1311	179-1317
Dužina (mm)	15	13
Širina (mm)	6.4	4.7
Visina (mm)	3	2.5
Ekspanzija (mm)	4	3
Ekspanzija po rotaciji od 360°C(mm)	0.35	0.35

Skladištenje

Proizvodima se mora rukovati i moraju se skladištiti tako da se spreči kontaminacija stranim supstancama. Moraju biti zaštićeni od direktne sunčeve svetlosti i čuvani na sobnoj temperaturi.

Indikacija

Nepravilno postavljeni zubi, za koje je potreban ortodontski tretman sa mobilnim aparatima za mezijalizaciju ili distalizaciju tokom zatvaranja dijasteme.

Kontraindikacije

U slučaju poznatih netolerancija i potencijalnih alergijskih reakcija na sadržaj, proizvodi se ne smeju koristiti.

Grupe pacijenata

Deca, adolescenti i odrasli.

Korisnik i korisnički zahtevi

Proizvode moraju pripremati samo kvalifikovani stručnjaci ili ortodonti koristeći odgovarajuće instrumente. Pripremljeni aparat smeju koristiti samo stručnjaci kvalifikovani u skladu sa odgovarajućim zakonskim smernicama.

Napomene o upotrebi

Zubi između kojih treba zatvoriti dijastemu moraju biti opremljeni Adamsovom kvačicom kako bi se sprečilo naginjanje zuba. Držači moraju biti precizno podešeni, posebno u slučaju aparata sa vučnim šrafovim. Ako ima previše sile, moguće je postići samo naginjanje krunice.

U slučaju dijastema sa obe strane zuba, preporučuje se da se dijastema prvo zatvori samo sa jedne strane kako bi se postigla bolja stabilnost u prednjem delu.

Mikro-verzija 179-1317 zahteva izuzetno pažljivo postavljanje u akrilnu ploču:

- Strana ekspanzionog šrafa sa trakom za zadržavanje mora biti potpuno i što je moguće dublje ugrađena u akril.
- Rezni useci smeju se praviti samo do dubine plastičnog držača. Dublji useci ne smeju se praviti.

- Voštana obloga sme se samo prokuvati – nikada se ne sme glodati. U suprotnom, postoji rizik da se deo zadržavanja za telo šrafa izgubi u akrilu.

Preporuke za rukovanje i održavanje:

1. Aktivacija se vrši u skladu sa uputstvima lekara u pravcu prikazanom od strane indikatora.
2. Ključ za ekspanzione šrafove 100-0001 se koristi za aktivaciju.
3. Redovno čišćenje dostupnih delova šrafa, kao što su vreteno i glava vretena, četkanjem sa mekom četkom je potrebno.

Napomena

Informacije za pacijenta: Pacijent mora dobiti informacije o aktivaciji, rukovanju i održavanju.

Materijali

	139-1311	179-1317
Materijali	1.4305*, 1.4310*	1.4305*, 1.4310*

*Sadrži Nikl

Odlaganje/reciklaža

Aparat mora biti odložen u skladu sa regionalnim ili nacionalnim zakonskim zahtevima za materijale korišćene u kliničkoj praksi.

Napomene o obavezi prijavljivanja

Proizvođač i nadležni nacionalni organ moraju biti obavešteni o svim ozbiljnim neželjenim događajima vezanim za proizvod.

Vrste i dodaci

Ključ za ekspanzione šrafove 100-0001.

Nadam se da je ovaj prevod koristan. Ako imate još pitanja ili vam treba dodatna pomoć, slobodno se obratite.

Ikone i oznake



Medicinsko sredstvo



Pridržavati se uputstva za upotrebu



Nemojte ponovo koristiti



Obratite pažnju na priloženi dokument



Sadržu nikl



Šifra proizvoda



Broj proizvodne serije



Datum proizvodnje



Proizvođač



FORESTADENT Bernhard Förster GmbH

Westliche Karl-Friedrich-Straße 151

75172 Pforzheim (Germany)

Phone + 49 7231 459-0 · Fax + 49 7231 459-102

info@forestadent.com · www.forestadent.com

ZDRUCK504/06.2021