

#### Uputstvo za upotrebu

Ovlašćeni predstavnik: Dental Express d.o.o.,  
Uroša Martinovića 21/L2, Novi Beograd,  
office@dentalexpress.rs

Proizvođač: Myofunctional Research CO.,  
Australia

Broj resenja: 515-02-01071-2021-7

#### Trainer for braces T4B – uložak za korekciju zagrižaja preko bravica T4B

Miofunkcionalni aparat za decu sa fiksnim  
ortodontskim aparatom.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži  
informacije koje su važne za Vas.

Ovo medicinsko sredstvo je isključivo za  
profesionalnu upotrebu i ne može se koristiti  
bez nadzora doktora stomatologije ili  
specijaliste ortopedije vilica. Neophodno je da  
pažljivo koristite medicinsko sredstvo.

Aparat je namenjen za jednog pacijenta.  
Upotreba aparata na drugom pacijentu ne  
dovodi do željenih rezultata.

Čuvati na sobnoj temperaturi.

Pakovanje: 1 aparat pakovan u kutiji.

#### U ovom uputstvu pročit ćete:

1. Šta je miofunkcionalni aparat i čemu je namenjen?
2. Karakteristike aparata?
3. Kako se upotrebljava?
4. Procedura postavljanja aparata u ustima
5. Moguće neželjene reakcije
6. Kombinacija sa ostalim aparatima
7. Koji je cilj tretmana
8. Čišćenje i čuvanje miofunkcionalnog aparata
9. Ostale informacije

#### Šta je miofunkcionalni aparat i čemu je namenjen?

Miofunkcionalni aparat je sistem specijalno  
dizajniran za korekciju loših oralnih navika i  
istovremeno ispravlja probleme u razvitku  
gornje i donje vilice, kao i pravilnom položaju  
zuba.

#### Karakteristike T4B aparata

- Ispravan položaj vilica.  
Kombinacija prevencije guranja

jezika, infantilnog gutanja i  
disanja na usta pomaže u  
korekciji II klase.

- T4B smanjuje probleme u  
temporomandibularnom zglobu
- Udubljena napravljena zbog  
bravica i lukova na treneru  
omogućavaju dobru zaštitu  
sluzokože u fazi nošenja fiksnog  
aparata
- Jezičak na treneru za korekciju  
položaja vrha jezika

#### Kako se upotrebljava?

Koristiti trener T4B koristiti 1-2h preko dana i  
preko noći.

Koristite T4B dok učite, čitate, gledate TV ili  
dok radite. Najbolje je krenuti sa T4B odmah  
kada se postave bravice. T4B će na taj način  
omogućiti lakše privikavanje na fiksne  
aparate.

- T4B se može koristiti i pre  
ortodontskog tretmana sa ciljem  
da poboljša razvitak vilica i smanji  
potrebu za kompleksnim  
tretmanima.
- T4B se može koristiti kada se  
pacijentu postavi gornji fiksni  
aparat i nošenjem trenera se  
omogućava usklađivanje položaja  
vilica i u nekim slučajevima nije  
potrebno postaviti donjih fiksni  
aparat. T4B se može koristiti i u  
kombinaciji sa drugim  
ortodontskim aparatima.
- T4B može ispasti tokom noći u  
početku. Nastaviti sa upotrebom  
trejnera. Ukoliko noćno  
nošenje nije moguće, povećajte  
nošenje u toku dana.
- Nositi trener svaki dan i truditi se  
da to postane rutina. Koristiti po  
uputstvu koje daje doktor  
specijalista ortodontije.
- Truditi se da su usne spojene  
kada se trener nalazi u ustima
- Pozicija vrha jezika treba da se  
nalazi na jezičku

#### Procedura postavljanja aparata u ustima pacijenta:

- Step 1. Držite trener tako da je  
graničnik za jezik postavljen  
nagore
- Step 2. Postavite trener u usta
- Step 3. Držite položaj jezika tako  
da se jezik dodiruje svojom

gornjom stranom i vrhom  
graničnik za jezik.

- Step 4. Zatvorite usne i dišite kroz  
nos

#### Moguće neželjene reakcije

Zubi mogu postati u početku tretmana  
osetljiviji, to je potpuno normalno, ali ako  
osetljivost i bol perzistira obratite se Vašem  
stomatologu, ortodontu.

#### Kombinacija sa ostalim aparatima

T4B se koristi pre i u toku nošenja fiksnog  
aparata kao pomoć u korekciji pozicije vilica

#### Cilj tretmana:

- Usne su sastavljene, sem tokom  
govora i jela
- Disanje je na nos što omogućava  
pravilni razvitak gornje i donje  
vilice i pravilan preklap zuba
- Nema aktivnosti usana prilikom  
gutanja, što omogućava prednji  
zubima da se normalno razvijaju
- Poboljšan raspored zuba u vilici
- Poboljšan razvitak lica

Dužina trajanja tretmana je  
individualna. Trejner se mora  
nositi i danju.

Posete Vašem stomatologu ili  
ortodontu su obavezne za  
uspešan tretman.


**Čišćenje:** Čistiti tekućom toplom vodom svaki  
put kada aparat izvadite iz usta. Koristiti  
Myoclean tablete da temeljno očistite aparat  
dva puta nedeljno. Pitajte Vašeg doktora za  
Myoclean, preporučeno sredstvo za čišćenje  
svih MRC aparata. Aparat čuvati na sobnoj  
temperaturi.

#### Ostale informacije

Opres. Ne grizite Myobraces!!!

Opres. Može se desiti da Myobraces aparat  
ispadne tokom noći u početku terapije,  
ukoliko se to dogodi povećajte nošenje  
aparata u toku dana.

OPREZ: KORISTITI APARAT SAMO POD  
NADZOROM LICENCIJANOG ORTODONTA ILI  
DOKTORA

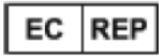

European Representative: Myofunctional Research Europe B.V, Gompensstraat 21C 5145 RM Waalwijk, Netherlands, P.O. Box 718, 5140 AS Waalwijk, Netherlands

