

Upustvo za upotrebu

Proizvođač: DB Orthodontics Ltd., Ryefield Way, Silsden, Keighley, West Yorkshire, BD20 OEF, United Kingdom.

Nosilac dozvole: Dental Express d.o.o. , Uroša Martinovića 21/lokal 2, Novi Beograd, Srbija, tel. 011/3111-048, email. office@dentalexpress

Broj upisa u registar: [515-02-04194-21-002](#)

Naziv proizvoda: Ortodontski vosak – 2 kom u pakovanju

Proizvod je namenjen pacijentima u ortodontskoj terapiji vilica

U ovom upustvu se nalazi sledeće:

1. Šta je ortodontski vosak
2. Način upotrebe

1. Šta je ortodontski vosak?

Ortodontski vosak smanjuje iritaciju i pomaže u prevenciji nastanka iritacija izazvanih bravicama i žicama koje se koriste u ortodontskoj terapiji. Vosak je providan i stapa se sa bojom zuba. Isporučuje se u višekratnoj kutijici.

2. Način upotrebe

Uzmite mali deo ortodontskog voska i rolajte ga između prstiju. Kada bude mekše konzistencije postavite ga nežno preko bravice i žice koja izaziva iritaciju. Vodite računa da ne pritiskate jako jer može doći do odlepljivanja bravice sa zuba. U slučaju da iritacija perzistira obratite se Vašem doktoru, specijalisti ortopedije vilica.

