



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Proizvođač: Reliance Orthodontic Products Inc, 1540 West Thorndale Ave., Itasca; IL 60143, USA

Ovlašćeni predstavnik: Dental Express d.o.o., Uroša Martinovića 21/local 2, Beograd, 11070, Srbija, tel. +381113111048, email. office@dentalexpress.rs

Broj rešenja: 515-02-01736-23-003

Naziv proizvoda: Assure universal bonding resin- Aktivator adheziva, ortodontski

INDIKACIJE ZA UPOTREBU: Assure® univerzalna lepljiva smola namenjena je povećanju adhezije na vlažnim ili suvim, normalnim i atipičnim površinama gleđi, uključujući: hipokalcifikovanu, fluorizovanu, mlečnu gleđ i dentin. Lepi se i za hrapavi metal (amalgam, zlato ili nerđajući čelik) i kompozitne restauracije bez dodatnih prajmera.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

PRIPREMA GLEĐI: Profilišite gleđne površine sa 1st & Final® pastom. Isperite i detaljno posušite. Nagrizite gleđnu površinu 30 sekundi. Isperite i detaljno posušite. Ako koristite samonagrizajući prajmer, utrljajte samonagrizajući prajmer u gleđ 5 sekundi, detaljno posušite na vazduhu.

APLIKACIJA SMOLE ZA LEPLJENJE: Na svaki pripremljeni zub nanosite jedan sloj Assure® univerzalne lepljive smole kako biste osigurali prodiranje. Lagano posušite vazduhom. Assure® se može prosvetliti lampom kako bi se sprečilo klizanje bravice , ali nije neophodno. Nastavite sa nanošenjem bilo kog hemijskog ili svetlosno polimerizujućeg lepka sa bravicom.

LEPLJENJE NA KOMPOZIT, ZLATO, AMALGAM, ČELIK & PLASTIKU:

Profilišite, isperite i osušite. Peskirajte, isperite i osušite. Nanesite jedan sloj Assure® univerzalne smole za lepljenje i lagano posušite. Nastavite sa aplikacijom paste i bravice.

LEPLJENJE NA KERAMIKU: Profilišite, isperite i osušite. Peskirajte, isperite i osušite. Nanesite Porcelain Etch, sačekajte 4 minute. Isperite i osušite. Nanesite jedan sloj Porcelain Conditioner, sačekajte 2 minute. Sušite 30 sekundi. Nanesite jedan sloj Assure, osušite i polimerizujte 10 sekundi. Nastavite sa postavljanjem bravice.

Posebna bezbednosna napomena: Aplikator četkice su namenjene za jednokratnu upotrebu. Potrebno je da se za svako nanošenje koristi nova aplikator četkica.



MERE PREDOSTROŽNOSTI: Nopolimerizovane smole mogu prouzrokovati osetljivost

kože kod osetljivih osoba. U slučaju dodira s kožom, detaljno je operite sapunom i vodom. Kontakt sa drugim tkivima: područje ispiranja odmah isperite velikom količinom vode u trajanju od nekoliko minuta.



Zapaljivo.



TEMPERATURNNA OGRANIČENJA: Čuvati na sobnoj temperaturi (15-30 stepeni C).

GARANCIJA: Reliance Orthodontic Products Inc. priznaje odgovornost za zamenu proizvoda ako se dokaže da je neispravan. Reliance Orthodontic Products Inc. ne prihvata odgovornost za bilo kakve štete ili gubitke, direktne ili posledične, koje proizilaze iz upotrebe ili nemogućnosti upotrebe proizvoda kao što je opisano. Pre upotrebe, korisnik je dužan da odredi pogodnost proizvoda za njegovu namensku upotrebu. Korisnik preuzima sav rizik i odgovornost u vezi s tim.

Rx Only: Savezni zakon ograničava prodaju ovog uređaja direkto od strane stomatologa ili po njegovom receptu.



Made in USA



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Reliance Orthodontic Products, Inc.

**1540 West Thorndale Ave., Itasca, IL 60143 U.S.A. 1-800-323-4348 •
www.RelianceOrthodontics.com**

