



Uputstvo za upotrebu

Proizvođač: Reliance Orthodontic Products Inc, 1540 West Thorndale Ave., Itasca; IL 60143, USA

Ovlašćeni predstavnik: Dental Express d.o.o., Uroša Martinovića 21/local 2, Beograd, 11070, Srbija, tel. +381113111048, email. office@dentalexpress.rs

Broj rešenja: **515-02-01736-23-003**

Naziv proizvoda: Gel Etchant – kiselina za nagrizanje gleđi, gel

INDIKACIJE ZA UPOTREBU: Reliance kiselina je namenjena za upotrebu pripreme gleđi za lepljenje.

INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU:

1. Izolujte zube za nagrizanje.
2. Pomoću vate ili četkice, nanesite sredstvo za nagrizanje na područja na koja treba lepiti. Ne utrljavajte sredstvo za nagrizanje na gleđ. Ostavite 30 sekundi za nagrizanje (60 sekundi za mlečne zube). Izbegavajte nanošenje kiseline na meka tkiva.
3. Detaljno isperite (5 sekundi po zubu za tečnu kiselinu i 10 sekundi po zubu za gel) da zaustavite proces nagrizanja i uklonite demineralizovane čestice.



OPREZ: Korozivno. Tečni ili gel za nagrizanje (fosforna kiselina) je snažan iritant za oči i tkiva. Ako ih slučajno unesete u oči, isperite velikom količinom vode i odmah potražite lekarsku pomoć. Kontakt sa drugim tkivima: područje ispiranja odmah isperite velikom količinom vode u trajanju od nekoliko minuta. Do povreda može doći ako ostane na koži ili sluznici tokom dužeg vremenskog perioda.



TEMPERATURN OGRANIČENJA: Čuvati na sobnoj temperaturi (15-30C)

GARANCIJA: Reliance Orthodontic Products Inc. priznaje odgovornost za zamenu proizvoda ako se dokaže da je neispravan. Reliance Orthodontic Products Inc. ne prihvata odgovornost za bilo kakve štete ili gubitke, direktne ili posredne, koje proizilaze iz upotrebe ili nemogućnosti upotrebe proizvoda kao što je opisano. Pre upotrebe, korisnik je dužan da odredi pogodnost proizvoda za njegovu namensku upotrebu. Korisnik preuzima sav rizik i odgovornost u vezi s tim.

Rx Only: Savezni zakon ograničava prodaju ovog uređaja direkto od strane stomatologa ili po njegovom receptu.



Reliance Orthodontic Products, Inc.



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands