



Uputstvo za upotrebu

Proizvođač: Reliance Orthodontic Products Inc, 1540
West Thorndale Ave., Itasca; IL 60143, USA

Ovlašćeni predstavnik: Dental Express d.o.o., Uroša
Martinovića 21/local 2, Beograd, 11070, Srbija, tel.
+381113111048, email. office@dentalexpress.rs

Broj rešenja: 515-02-01736-23-003

Naziv proizvoda: GoTo adhesive – adhesive, ortodontski,
svetlosno-polimerizujući

INDIKACIJE ZA UPOTREBU: GoTo® je namenjen za upotrebu kao lepak za svetlosnu polimerizaciju ili za izradu atačmena za termoplastične ajlajnere.

INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU:

Priprema zuba: Profilirajte površine gleđi koje treba zalepiti 1st & Final® ili običnom pastom bez ulja. Temeljno isperite i osušite zube komprimovanim vazduhom bez ulja i vlage.

Nagrizanje: Pomoću vate ili četkice nanosite sredstvo za nagrizanje na celo područje koje treba zalepiti. Ostavite 30 sekundi za nagrizanje (60 za mlečne zube). Izbegavajte stavljanje sredstva za nagrizanje na meko tkivo. Isperite i detaljno osušite.

Aplikacija prajmera: Nanesite jedan sloj Assure ili Assure Plus i osušite vazduhom. Ako se koristi Pro Seal ili Self Etching Primer, pogledajte uputstva za upotrebu Proseal i Self Etching prajmera za dodatne informacije. Nastavite sa nanošenjem paste.

Aplikacija paste na bravicu: Nanesite lepak na bazu bravice i razmažite ga u mrežu. Nanesite bravicu sa pastom na predviđenu površinu zuba. Postavite bravicu na predviđenu površinu zuba i prosvetlite lepak u neposrednoj blizini na 10 sekundi *. Nakon što pasta pravilno očvrstne, aktivni luk može se odmah postaviti.

Termoplastični ajlajneri: Profilirajte, nagrizite, isperite i osušite gleđ. Pripremite gleđ sa Assure® Universal Bonding Resin. Nanesite GoTo pastu u matricu ajlajnera, postavite matricu i polimerizujte 10 sekundi *

Napomena: Vreme sušenja zavisi od intenziteta svetlosti lampe. Ukupno vreme stvrdnjavanja može biti u rasponu od 6 sekundi do 20 sekundi. Za preporučena vremena očvršćivanja obratite se proizvođaču lampe.

Uklanjanje bravica i lepka:

Da biste uklonili GoTo™, koristite ligature cutter da biste zahvatili lepak na spoju bravica / gleđ i odvojite bravicu od zuba. Preostali materijal može se ukloniti Renew® sistemom završne obrade

OPREZ: Upotreba UV, halogenih i LED svetla za polimerizaciju može biti povezana sa oštećenjem oka. Pacijent, lekar i asistent treba da nose pravilno dizajnirane zaštitne naočare kada koriste ove uređaje za polimerizaciju svetlom.

 **MERE PREDOSTROŽNOSTI:** Nepolimerizovane smole mogu izazvati osetljivost kože kod osetljivih osoba. U slučaju dodira s kožom, temeljno je operite sapunom i vodom. Ako vam slučajno dodje u kontakt sa očima, isperite velikom količinom vode i odmah potražite lekarsku pomoć. Kontakt sa drugim tkivima: područje ispiranja odmah isperite velikom količinom vode u trajanju od nekoliko minuta.



Ograničenje temperature: Čuvati na sobnoj temperaturi (Od 15-30 stepeni C)

GARANCIJA: Reliance Orthodontic Products Inc. priznaje odgovornost za zamenu proizvoda ako se dokaže da je neispravan. Reliance Orthodontic Products Inc. ne prihvata odgovornost za bilo kakve štete ili gubitke, direktne ili posledične, koje proizilaze iz upotrebe ili nemogućnosti upotrebe proizvoda kao što je opisano. Pre upotrebe, korisnik je dužan da odredi pogodnost proizvoda za njegovu namensku upotrebu. Korisnik preuzima sav rizik i odgovornost u vezi s tim.

Rx Only: Ovaj proizvod je namenjen samo za profesionalnu upotrebu od strane doktora stomatologije



Reliance Orthodontic Products, Inc.



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands