

Upustvo za upotrebu

Ovlašćeni predstavnik: Dental Express d.o.o.,
Uroša Martinovića 21/L2, Novi Beograd,
office@dentalexpress.rs

Proizvođač: Myofunctional Research CO.,
Australia

Broj resenja: 515-02-01071-2021-7

Myobrace K2 mixed dentition- Myobrace K2 mešovita denticija

Miofunkcionalni aparat namenjen deci sa mešovitom denticijom

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovo medicinsko sredstvo je isključivo za profesionalnu upotrebu i ne može se koristiti bez nadzora doktora stomatologije ili specijaliste ortopedije vilica. Neophodno je da pažljivo koristite medicinsko sredstvo.

Aparat je namenjen za jednog pacijenta. Upotreba aparata na drugom pacijentu ne dovodi do željenih rezultata.

Čuvati na sobnoj temperaturi.

Pakovanje: 1 aparat pakovan u kutiji.

U ovom uputstvu pročit ćete:

1. Šta prouzrokuje ortodonske probleme?
2. Šta je miofunkcionalni aparat i čemu je namenjen?
3. Kako Myobrace funkcioniše?
4. Kako se upotrebljava?
5. Moguće neželjene reakcije
6. Kada se ne sme koristiti
7. Koji je cilj tretmana
8. Čišćenje i čuvanje miofunkcionalnog aparata
9. Ostale informacije

Šta prouzrokuje ortodonske probleme?

Većina naše dece ima problem sa teskobama u zubnom nizu i nepravilne položaje vilica. Moderna istraživanja su pokazala da nepravilne navike, kao što su: disanje na usta, guranje jezika unapred, infatilno gutanje i

sisanje palca su pravi uzroci nepravilnosti. Ove loše navike dovode do nepravilnog razvitka dečijih vilica i lica i sve to zajedno prouzrokuje ortodonske probleme. Ovako nastale nepravilnosti je nemoguće ispraviti fiksним aparatima.

Šta je miofunkcionalni aparat i čemu je namenjen?

Miofunkcionalni aparat je sistem specijalno dizajniran za korekciju loših oralnih navika i istovremeno ispravlja probleme u razvitku gornje i donje vilice, kao i pravilnom položaju zuba.

Kako Myobrace funkcioniše?

MRC je uveo korišćenje ovakve vrste aparata i dokazao da je moguće uspešno korigovati ortodonske anomalije bez bravica. Tretman sa ovim aparatima takođe dovodi do boljeg razvitka lica u toku rasta. Ključ uspeha je u korekciji pozicije i funkcije jezika i uvežbavanja oralnih mišića da adekvatno obavljaju svoju funkciju. Pored pozitivnog uticaja na jezik, oralnu muskulaturu, ovaj aparat prenosi i blage sile na zube što dovodi do njihovog ispravljanja.

Myobrace K2 se koristi kao druga faza i njen cilj je ispravljanje loše postavljanih zuba i vilica. Myobrace za decu sa mešovitom denticijom se sastoji od ukupno 3 faze K1, K2 i K3.

Kako se upotrebljava?

Myobrace aparat nositi tokom cele noći i još 1h do 2h u toku dana.

Procedura postavljanja aparata u ustima pacijenta:

Step 1. Držite Myobrace tako da je graničnik za jezik postavljen nagore

Step 2. Postavite Myobrace u usta

Step 3. Držite položaj jezika tako da se jezik dodiruje svojom gornjom stranom i vrhom graničnik za jezik.

Step 4. Zatvorite usne i dišite kroz nos

Dužina trajanja tretmana je individualna. Myobrace se mora nositi i danju. Posete Vašem stomatologu ili ortodontu su obavezne za uspešan tretman.

Moguće neželjene reakcije

Zubi mogu postati u početku tretmana osetljiviji, to je potpuno normalno, ali ako osetljivost i bol perzistira obratite se Vašem stomatologu, ortodontu.

Kada se ne sme koristiti?

Miofunkcionalni aparat Myobrace K2 se ne koristi u kombinaciji sa fiksним ili mobilnim aparatom. Obratite se Vašem stomatologu i one će Vam reći koji je aparat posebno namenjen u te svrhe.

Cilj tretmana:

- Usne su sastavljene, sem tokom govora i jela
- Disanje je na nos što omogućava pravilni razvitak gornje i donje vilice i pravilan preklap zuba
- Nema aktivnosti usana prilikom gutanja, što omogućava prednjim zubima da se normalno razvijaju
- Poboljšan raspored zuba u vilici
- Poboljšan razvitak lica

Čišćenje: Čistiti tekućom toplom vodom svaki put kada aparat izvadite iz usta. Koristiti Myoclean tablete da temeljno očistite aparat dva puta nedeljno. Pitajte Vašeg doktora za Myoclean, preporučeno sredstvo za čišćenje svih MRC aparata. Čuvati na sobnoj temperaturi.

Ostale informacije

Opres. Ne grizite Myobrace!!!

Opres. Može se desiti da Myobrace aparat ispadne tokom noći u početku terpaije, ukoliko se to dogodi povećajte nošenje aparata u toku dana.

OPREZ: KORISTITI APARAT SAMO POD NADZOROM LICENCIANOG ORTODONTA ILI DOKTORA