



Uputstvo za upotrebu

Proizvođač: Reliance Orthodontic Products
Inc, 1540 West Thorndale Ave., Itasca; IL 60143,
USA

Ovlašćeni predstavnik: Dental Express d.o.o.,
Uroša Martinovića 21/local 2, Beograd, 11070,
Serbija, tel. +381113111048, email.
office@dentalexpress.rs

Broj rešenja: 515-02-01736-23-003

Naziv proizvoda:
Light Bond – adhezive/
aktivator/ set (
adhezive + aktivator),
ortodontski, svetlosno
polimerizujući

INDIKACIJE ZA UPOTREBU: Light
Bond™ namenjen je za upotrebu kao
svetlosno polimerizujući adheziv za
bravice i lingvalne retejnere

INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU:

PRIPREMA GLEDI

Profilirajte površine za lepljenje sa 1st & Final®
pastom bez ulja. Isperite i osušite. Nanesite
sredstvo za nagrizanje na zub. Ostavite 30 sekundi
za nagrizanje. Isperite i dobro prosušite.

APLIKACIJA ZAPTIVAČA:

Na pločicu za mešanje nakapajte kapljicu ili dve
Light Bond zaptivača. Nanesite tanak sloj
zaptivača na nagriženu gleđ. Nije neophodno da
polimerizujete zaptivač u ovom koraku.
Polimerizovan zaptivač, može izvršiti prevenciju
pomeranja bravice. NAPOMENA– da biste povećali
jačinu ili pri upotrebi na mlečnoj gleđi potrebno je
koristiti Assure® Plus umesto Light Bond
zaptivača i posušiti vazduhom.

APLIKACIJA PASTE:

Nanesite Light Bond pastu na bazu bravice i
špatulicom razmažite u mrežu. Postavite bravicu
na zub i pritisnite. Očistite višak i prosvetlite 10
sekundi.

Napomena: Vreme sušenja zavisi od intenziteta
svetlosti očvršćavanja.

Posebna bezbednosna napomena: Aplikator
četkice, nastavci i pločice za mešanje su

namenjeni za jednokratnu upotrebu. Špatulice i
činijice za mešanje mogu biti sterilisane u
autoklavu ili hemijski između upotrebe.

OPREZ: Upotreba UV, halogenih i LED svetala
za polimerizaciju može biti povezana sa
oštećenjem oka. Pacijent, lekar i asistent treba
da nose pravilno dizajnirane zaštitne naočare
kada koriste ove uređaje.

NERE PREDOSTROŽNOSTI:

Nepolimerizovane smole, kao što je svetlosno
polimerizujući lepak, mogu izazvati osetljivost
kože kod osetljivih osoba. U slučaju dodira s
kožom, detaljno je operite sapunom i vodom.
Ako vam se slučajno unese u oči, isperite
velikom količinom vode i odmah potražite
lekarsku pomoć. Kontakt sa drugim tkivima:
područje ispiranja odmah isperite velikom
količinom vode u trajanju od nekoliko minuta.

Kiseline su korozivne.

TEMPERATURNAPREDOSTROŽNOSTI:

Čuvati na sobnoj
temperaturi (15-30
stepeni C).

VAŽNO! Razmazana srednja ili tanka
Light Bond pasta ne sme se izlagati
direktnom svetlu tokom dužeg
vremenskog perioda jer može doći do
delimične aktivacije. Lepak se može
naneti na bravice unapred, ali mora biti
zaštićena od bilo kakvog ambijentalnog
svetla (tj., prekriti ga kutijom).

SADRŽAJ SETA: Economy Kit (set): 20g Paste
u šprici ili špric nastavak, (2) 3cc Light Bond™
zalivač, 23 gm tečna kiselina, paket pomoćne
opreme.

GARANCIJA: Reliance Orthodontic Products
Inc. priznaje odgovornost za zamenu proizvoda
ako se dokaže da je neispravan. Reliance
Orthodontic Products Inc. ne prihvata
odgovornost za bilo kakve štete ili gubitke,
direktne ili posledične, koje proizilaze iz
upotrebe ili nemogućnosti upotrebe proizvoda
kao što je opisano. Pre upotrebe, korisnik je
dužan da odredi pogodnost proizvoda za
njegovu namensku upotrebu. Korisnik
preuzima sav rizik i odgovornost u vezi s tim.

Rx Only: Samo za profesionalnu upotrebu