



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Proizvođač: Reliance Orthodontic Products Inc, 1540 West Thorndale Ave., Itasca; IL 60143, USA
Ovlašćeni predstavnik: Dental Express d.o.o., Uroša Martinovića 21/local 2, Beograd, 11070, Srbija,
tel. +381113111048, email. office@dentalexpress.rs
Broj rešenja: 515-02-01736-23-003

Naziv proizvoda: Porcelan primer – prajmer za dentalnu keramiku

Namena: Reliance keramički kondicioner namenjen je za upotrebu u pripremi glazirane zubne keramike za lepljenje. Keramički kondicioner je sredstvo za spajanje silana koji se hemijski sjedinjuje sa silicijumom u keramici i akrilom u hemijskim, svetlosnim i dvostrukim lepkovima.

Instrukcije za upotrebu:

1. Peskirati površinu keramike. Isperite i osušite.
2. Nanesite jedan tanki sloj Reliance Porcelain kondicionera. Izolujte i sačekajte 2 puna minuta. Detaljno osušiti vazduhom. Ako se koristi puster sa toplim vazduhom za sušenje, vreme čekanja može se smanjiti na 1 minut.
3. Nanesite 1 sloj Assure Plus, lagano osušite vazduhom i prosvetlite lampom na 10 sekundi.
4. Nastavite sa postavljanjem bravice.




MERE PREDOSTROŽNOSTI: Može da izazove osetljivost kože kod osetljivih osoba. U slučaju dodira s kožom, temeljno je operite sapunom i vodom. Kontakt sa drugim tkivima: područje odmah isperite velikom količinom vode u trajanju od nekoliko minuta.

OPREZ: NE UPOTREBLJAVAJTE UKOLIKO BOČICA POSTANE KONTAMINIRANA. ZA SVAKOG PACIJENTA JE POTREBAN NOVI APLIKATOR RADI IZBEGAVANJA RIZIKA KONTAMINACIJE.



Keramički kondicioner je zapaljiv.

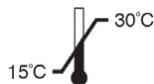

Ograničenje temperature: Čuvati na sobnoj temperaturi (Od 15-30 stepeni C)

GARANCIJA: Reliance Orthodontic Products Inc. priznaje odgovornost za zamenu proizvoda ako se dokaže da je neispravan. Reliance Orthodontic Products Inc. ne prihvata odgovornost za bilo kakve štete ili gubitke, direktne ili posledične, koje proizilaze iz upotrebe ili nemogućnosti upotrebe proizvoda kao što je opisano. Pre upotrebe, korisnik je dužan da odredi pogodnost proizvoda za njegovu namensku upotrebu. Korisnik preuzima sav rizik i odgovornost u vezi s tim.

Rx Only: Ovaj proizvod namenjen je samo za profesionalnu upotrebu od strane doktora stomatologije.



1540 West Thorndale Ave., Itasca, IL 60143 U.S.A.

1 - 800 - 323 - 4348 • www.RelianceOrthodontics.com



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands