



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Proizvođač: Reliance Orthodontic Products Inc, 1540 West Thorndale Ave., Itasca; IL 60143, USA

Ovlašćeni predstavnik: Dental Express d.o.o., Uroša Martinovića 21/local 2, Beograd, 11070, Srbija, tel. +381113111048, email. office@dentalexpress.rs

Broj rešenja: 515-02-01736-23-003

Naziv proizvoda: Rely a bond – hemijsko polimerizujući adhezive/aktivator/ set (adhezive + aktivator)

INDIKACIJE ZA UPOTREBU Rely•a•Bond® namenjen je za lepljenje metalnih, kompozitnih i keramičkih ortodontskih bravica.

Kontraindikacije: Sistem bondiranja bez mešanja ne preporučuje se za lepljenje lingvalnih bravica bez vezivne podloge.

INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU:

PROFILAKSA: Pomoću mašinskog instrumenta gumenim polirerom ili četkicom očistite površine gleđi koje se bondiraju sa 1st & Final® ili običnim pastom. Temeljito isperite i osušite zube komprimovanim vazduhom bez ulja i vlage.

NAGRIZANJE: Pomoću pamučne vate ili četkicom nanesite sredstvo za nagrizanje na celo područje koje treba bondirati. Ne utrljavajte sredstvo za nagrizanje u gleđ. Ostavite 30 sekundi za nagrizanje (60 sekundi za mlečne zube). Izbegavajte stavljanje kiseline za nagrizanje na meko tkivo.

ISPIRANJE I SUŠENJE: Isperite svaki zub velikom količinom vode u trajanju od 10 sekundi (20 sekundi za gel etch) kako biste zaustavili proces nagrizanja i uklonili demineralizovane čestice

ADAPTACIJA BRAVICA: Bravica koja treba da se veže sa Rely • a • Bond® treba da ima bazu koja se uklapa u površinu zuba. Pomoću klešta prilagodite sve osnove koje se ne podudaraju.

PROCEDURA BONDIRANJA: Na svaki nagriženi i osušeni zub nanesite tanki premaz na površinu na koju treba zalepiti bravicu, i na donjoj strani osnove nosača. Špatulicom nanesite malu količinu lepljive paste na donju stranu nosača i stavite na zub. U roku od 25 sekundi postavite bravicu na željenu angulaciju i čvrsto pritisnite. Višak lepka se može lako ukloniti sa periferije osnove bravice nakon što su sve bravice na mestu. Aktivni luk može biti postavljen 5 minuta nakon postavljanja bravice.

UKLANJANJE BRAVICE: Pomoću klešta za skidanje bravica, pričvrstite držač na gleđ / ivicu bravice odvajajući bravicu i podlogu za lepljenje sa zuba. Preostali lepak se može ukloniti svrdlom ili Reliance Renew® sistemom završne obrade. Završno poliranje može se izvesti sa Renew® sistemom završne obrade # 383.

BONDIRANJE ZA VEŠTAČKI SUPSTRAT: Pogledajte uputstva za univerzalno lepljenje za Assure® ili Assure® Plus lepljenje.

2


Posebna bezbednosna napomena: Aplikatori sa četkicom i podloge za mešanje su namenjeni za jednokratnu upotrebu. Potrebno je da se koriste nove aplikator četkice i podloga za mešanje za svakog pacijenta. Lopatice i zdelice za mešanje mogu se autoklavirati.



MERE PREDOSTOŽNOSTI: Nopolimerizovane smole mogu prouzrokovati osetljivost kože kod osetljivih osoba. U slučaju dodira s kožom, temeljno je operite sapunom i vodom. Ako se slučajno unese u oči, isperite velikom količinom vode i odmah potražite lekarsku pomoć. Kontakt sa drugim tkivima: područje ispiranja odmah isperite velikom količinom vode u trajanju od nekoliko minuta.



Kiselina i prajmer su korozivni.

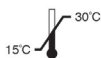

TEMPERATURN OGRANIČENJE: Čuvati na sobnoj temperaturi (15-30 stepeni C). Zaštititi od prevelike toplote.

SADRŽAJ PAKOVANJA: 14g Adhezivne paste (bočica, nastavci za spriceve ili špricevi 16g Prajmer, kiselina, listovi za mešanje, špatula and četkice.

GARANCIJA: Reliance Orthodontic Products Inc. priznaje odgovornost za zamenu proizvoda ako se dokaže da je neispravan. Reliance Orthodontic Products Inc. ne prihvata odgovornost za bilo kakve štete ili gubitke, direktne ili posledične, koje proizilaze iz upotrebe ili nemogućnosti upotrebe proizvoda kao što je opisano. Pre upotrebe, korisnik je dužan da odredi pogodnost proizvoda za njegovu namensku upotrebu. Korisnik preuzima sav rizik i odgovornost u vezi s tim.

Rx Only: Savezni zakon ograničava prodaju ovog uređaja direkto od strane stomatologa ili po njegovom receptu.



Reliance Orthodontic Products, Inc.



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Made in USA