

Proizvođač: Reliance Orthodontic Products Inc, 1540 West Thorndale Ave., Itasca, IL 60143, USA

Ovlašćeni predstavnik: Dental Express d.o.o., Uroša Martinovića 21/local 2, Beograd, 11070, Srbija, tel. +381113111048, email. office@dentalexpress.rs

Broj rešenja: 515-02-01736-23-003

Naziv proizvoda: Ultra Band Lock regular / Ultra Band Lock blue- adheziv, ortodontski, svetlosno-polimerizujući

INDIKACIJE ZA UPOTREBU:

Ultra Band-Lok® je namenjen za upotrebu kao ortodontski cement za cementiranje prstenova kao i za podizanje okluzije.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Cementiranje prstenova:

- A.** Detaljno očistite zube sa 1st & Final® programom. Isperite, osušite i izolujte zub.
 - B.** Jetkanje kiselinom gleđi nije potrebno za cementiranje prstenova; međutim, preporučuje se prilikom cementiranja prstenova izloženih jakim silama.
 - C.** Na unutrašnju stranu prstena nanosite Ultra Band-Lok®.
 - D.** Postavite prsten na zub, i očistite ivice prstena od viška cementa. Postavite svetlosni vrh lampe u neposrednoj blizini okluzalne površine zuba, krećući se lagano u krug oko ivica prstena, prosvetlite 30 sekundi. U ovom trenutku cement je potpuno očvrstnut, što omogućava trenutno postavljanje.
- Ako koristite Luer-Loc špriceve:
- a) Odvijte i uklonite crni poklopac za skladištenje sa vrha šprica.
 - b) Postavite A2 nastavak na mesto i okrenite ga u smeru kazaljke na satu dok se vrh ne zaključa u svom položaju.
 - c) Kada je postupak dovršen, uklonite A2 nastavak i vratite crni poklopac za skladištenje kako bi Ultra Band-Lok®

bio zaštićen od svetlosti.

POSEBNA SIGURNOSNA NAPOMENA U VEZI SA BEZBEDNOSNIM RIZIKOM ZA PACIJENTA: A2 NASTAVAK JE NAPRAVLJEN ZA JEDNOKATNU UPOTREBU. ZA SVAKOG PACIJENTA JE POTREBNO UPOTREBITI NOVI A2 NASTAVAK KAKO BI IZBEGLI RIZIK OD KONTAMINACIJE.

Aplikacija prilikom podizanja okluzije: Profilaksa, ispiranje i sušenje. Nagrizite željenu površinu 30 sekundi, a zatim je isperite, osušite i izolujte. Nanesite Ultra Band u količini i obliku koji je potreban na okluzalnu površinu. Prosvetlite 20 sekundi. Napomena: samonagrizajući prajmer se može koristiti umesto jetkanja fosforom-kiselinom..

Važno: Ultra Band-Lok® je osetljiv na okolnu svetlost. Nopolimerizovani proizvod zaštići od svetlosti sve dok ne bude spreman za sledeću upotrebu.



MERE PREDOSTROŽNOSTI:

Nepolimerizirane smole mogu izazvati osetljivost kože kod osetljivih osoba. U slučaju dodira s kožom, temeljno je operite sapunom i vodom. Kontakt sa drugim tkivima: područje ispiranja odmah isperite velikom količinom vode u trajanju od nekoliko minuta.

Upotreba UV, halogenih i LED svetala za polimerizaciju može biti povezana sa oštećenjem očiju. Pacijent, lekar i asistent treba da nose pravilno dizajnirane zaštitne naočare kada koriste lampe za polimerizaciju svetlom.



TEMPERATURA

OGRANIČENJA: Čuvajte u frižideru (2-8 ° C).

Izbegavajte preterano izlaganje toploti. Pre upotrebe

pustite da proizvod dostigne sobnu temperaturu

GARANCIJA: Reliance Orthodontic Products Inc. priznaje odgovornost za zamenu proizvoda ako se dokaže da je neispravan. Reliance Orthodontic Products Inc. ne prihvata odgovornost za bilo kakve štete ili gubitke, direktne ili posledične, koje proizilaze iz upotrebe ili nemogućnosti upotrebe proizvoda kao što je opisano. Pre upotrebe, korisnik je dužan da odredi pogodnost proizvoda za njegovu namensku upotrebu. Korisnik preuzima sav rizik i odgovornost u vezi s tim.

Rx Only: Savezni zakon ograničava prodaju ovog uređaja direkto od strane stomatologa ili po njegovom receptu.